

Mezižební chrupavka



Štěp chrupavky lze použít k chirurgické rekonstrukci poškozené chrupavky. Její použití se ukázalo jako efektivní při různých rekonstrukčních zákrocích, včetně mikrocie, defektů orbitálního dna a primární i revizní rhinoplastiky.

Definice: Muskuloskeletální tkáň lidského původu alogenní, sterilní, zmrazená.

Složení: Chrupavka. Tkáně mohou obsahovat stopy antibiotika gentamicin.

Balení: Každá tkáň je individuálně vakuově balena do fóliových obalů. Primární obal je vložen do sekundárního obalu a poté do terciárního obalu, který obsahuje kapsu s finálním štítkem. Terciární obal je finálním ochranným obalem.

Skladování: Skladujte při teplotě -20 °C až -39,9 °C max. 1 měsíc a při teplotě -40 °C a nižší do data expirace uvedeného na štítku.

Expirace: 5 let od data zpracování tkáně v případě skladování při teplotě -40 °C a nižší.

Indikace: Rekonstrukční operace v chirurgii, ortopedii, traumatologii, sportovní medicíně a plastické chirurgii.

Příprava tkáně k použití: Vyjměte tkáň a rozmrazte ji ponořením do sterilního fyziologického roztoku při pokojové teplotě a počkejte, dokud se měkké části tkáně zcela nerozmrazí, minimálně 30 minut.