

# Šlacha peroneus longus



**Šlacha peroneus longus se obvykle používá při replastice kolenního kloubu. Použitím šlachy peroneus longus se umožňuje vyhnout nutnosti získat štěp z vlastního těla pacienta a poskytuje dostatečnou stabilitu. Je ideální pro ty, kteří se chtějí vrátit ke sportovní aktivitě.**

**Definice:** Muskuloskeletální tkáň lidského původu alogenní, sterilní, zmrazená.

**Složení:** Svalová šlacha. Tkáně mohou obsahovat stopy antibiotika gentamicin.

**Balení:** Každá tkáň je individuálně vakuově balena do fóliových obalů. Primární obal je vložen do sekundárního obalu a poté do terciárního obalu, který obsahuje kapsu s finálním štítkem. Terciární obal je finálním ochranným obalem.

**Skladování:** Skladujte při teplotě  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $-39,9\text{ }^{\circ}\text{C}$  max. 1 měsíc a při teplotě  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nižší do data expirace uvedeného na štítku.

**Expirace:** 5 let od data zpracování tkáně v případě skladování při teplotě  $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$  a nižší.

**Indikace:** Rekonstrukční operace v chirurgii, ortopedii, traumatologii a sportovní medicíně.

**Příprava tkáně k použití:** Vyjměte tkáň a rozmrazte ji ponořením do sterilního fyziologického roztoku při pokojové teplotě a počkejte, dokud se měkké části tkáně zcela nerozmrazí, minimálně 30 minut.